

# ULOTKA INFORMACYJNA

## Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wełnianych

---

### Przeznaczenie

Wyroby znajdują zastosowanie w rehabilitacji leczniczej osób dotkniętych chorobą reumatoidalną, zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa, nerwobólach pourazowych, bólach reumatycznych. Służą do codziennego użytku.

### Użytkowanie

Poprzez ogrzanie i delikatny masaż zmniejszają napięcie mięśni, pobudzają zakończenia nerwowe, łagodzą bóle pochodzenia reumatycznego i zwiększają zakres ruchów w stawach, Ocieplacze mają zastosowanie po zabiegach fizykalnych (parafinoterapii, kąpielach, elektroterapii) w celu przedłużenia działania efektu cieplnego.

### Przeciwwskazania

- Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą.
- Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany.

### Ostrzeżenia

Nie należy przykładać wyrobów wysokorunnych do miejsc skaleczonych i otwartych ran. W przypadku używania ocieplaczy przez małe dzieci należy zwracać uwagę na możliwość oderwania zapięć – guzików lub kołków.

### Przepis prania

- Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę.
- Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.
- Suszyć w stanie rozwieszonym.
- Nie wirować.
- Nie prasować.
- Można czyścić chemicznie.



Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach. Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności.