

# ULOTKA INFORMACYJNA

## Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wełnianych

---

### Przeznaczenie

Wyroby znajdują zastosowanie w rehabilitacji leczniczej oraz profilaktyce u osób dotkniętych: chorobą reumatoidalną, zwyrodnieniowa stawów kończyn i kręgosłupa, zapaleniem mięśni.

### Użytkowanie

Zaleca się stosować przedmiotowe wyroby po zakończeniu zabiegów rehabilitacyjnych, w celu przedłużenia działania efektu cieplnego. Wyroby poprzez ogrzanie i delikatny masaż włókna wełniane likwidują napięcie mięśni, pobudzają zakończenia nerwowe, przez co łagodzą dolegliwości związane z bólami stawów pochodzenia reumatycznego i pourazowego, zmniejszają obrzęki i sztywność stawów. Służą do codziennego użytku.

### Przeciwwskazania

- Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą.
- Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany.

### Ostrzeżenia

Nie należy przykładać wyrobów wysokorunnych do miejsc skaleczonych i ran otwartych.

### Przepis prania

- Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę.
- Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.
- Suszyć w stanie rozwieszonym.
- Nie wirować.
- Nie prasować.
- Można czyścić chemicznie.



Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach. Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności.