

ULOTKA INFORMACYJNA

Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wełnianych

Przeznaczenie

Wyroby znajdują zastosowanie w rehabilitacji leczniczej osób dotkniętych: zwyrodnieniami kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, zapaleniem korzonków nerwowych, schorzeniami nerek i pęcherza.

Użytkowanie

Zaleca się stosować przedmiotowe wyroby po zakończeniu zabiegów rehabilitacyjnych, w celu przedłużenia działania efektu cieplnego. Wyroby poprzez wygrzanie tkanek doprowadzają do zmniejszenia napięcia mięśni, pobudzają zakończenia nerwowe w tkankach, przez co łagodzą dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, kojąco wpływają na schorzenia nerek i pęcherza. Służą do codziennego użytku.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą.
- Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany.

Ostrzeżenia

Nie należy przykładać wyrobów wysokorunnych do miejsc skaleczonych i ran otwartych.

Przepis prania

- Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę.
- Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.
- Suszyć w stanie rozwieszonym.
- Nie wirować.
- Nie prasować.
- Można czyścić chemicznie.



Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach. Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności.