

ULOTKA INFORMACYJNA

Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wełnianych

Przeznaczenie

Wyroby wełniane mogą być zastosowane w rehabilitacji leczniczej oraz profilaktyce u osób dotkniętych: chorobami reumatoidalnymi i zwyrodnieniowymi górnego odcinka kręgosłupa, zeszywniającym zapaleniem mięśni, skutkami urazów (złamań, zwicnięć, deformacji, przykurczy, niestabilnością stawów) oraz dla osób ze skłonnościami do nadmiernego pocenia się, uczulonych na pierze i roztocze.

Użytkowanie

Wyroby wełniane poprzez stabilizację w odcinku szyjnym i ogrzanie tej okolicy likwidują wymuszone napięcie mięśni barków i kręgosłupa szyjnego w trakcie długiej podróży oraz pozwalają na prawidłowe ułożenie głowy podczas leżenia i spania. Przedmiotowe wyroby mogą być używane również jako podpory karku i szyi w czasie ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz po zakończeniu zabiegów rehabilitacyjnych, w celu przedłużenia działania efektu ciepłego oraz do codziennego użytku.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą.
- Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany.

Ostrzeżenia

Dla niemowląt i małych dzieci oraz osób wrażliwych na działanie wełny zaleca się użytkowanie wyrobów wełnianych powleczonego w poszewki z tkanin bawełnianych. Zabezpieczy to również przed dostaniem się luźnych włókien wełnianych do oczu, nosa i gardła oraz związanego z tym nieprzyjemnego efektu drażniącego.

Przepis prania

- Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę.
- Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.
- Suszyć w stanie rozwieszonym.
- Nie wirować.
- Nie prasować.
- Można czyścić chemicznie.



Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach. Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności.