

# ULOTKA INFORMACYJNA

## Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wełnianych

---

### Przeznaczenie

Wyroby wełniane mogą być zastosowane w rehabilitacji leczniczej oraz profilaktyce u osób dotkniętych: porażeniem kończyn dolnych i zaburzeniami troficznymi jeżdżących na wózkach inwalidzkich, zeszywniającym zapaleniem mięśni, skutkami urazów (złamań, deformacji, niestabilnością stawów), zapaleniem dróg moczowych, porażeniem nerwów oraz zaburzeniami krążenia.

### Użytkowanie

Szorstka powierzchnia runa owczego pobudza zakończenia nerwowe i poprawia działanie mięśni.

Stałe łagodne ciepło poprawia krążenie obwodowe i trofikę. Zabezpiecza prawidłowe oddychanie skóry

i zapobiega nadmiernej potliwości ud i pośladków. Służą do codziennego użytku.

### Przeciwwskazania

- Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą.
- Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany.

### Ostrzeżenia

Nie należy przykładać wyrobów wysokorunnych do miejsc skaleczonych i otwartych ran.

### Przepis prania

- Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę.
- Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.
- Suszyć w stanie rozwieszonym.
- Nie wirować.
- Nie prasować.
- Można czyścić chemicznie.



Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach. Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności.